



Instrucción de uso

Estéril por Radiación Gamma.

Un solo uso.

Cada envase contiene 1 unidad.

Utilizar sólo si el envase se encuentra intacto

Descripción e indicaciones

El sistema de implantes dentales está indicado para sustituir la raíz de uno o más dientes ausentes, para sostener y retener las restauraciones unitarias o múltiples, restituyendo al paciente una total y perfecta función para la masticación, vocalización oral (fonética) y apariencia estética.

La colocación de implantes dentales requieren una especialización profesional

específica en implantología, hecha en una entidad avalada. Es responsabilidad del cirujano su capacitación previa para utilizar estos productos.

Contraindicaciones

La colocación de implantes dentales está contraindicada en:

- falta de una buena calidad o cantidad ósea
- infección
- higiene oral deficiente
- uso de drogas y alcohol
- alergia al titanio
- tabaco (fumar)
- condiciones sistémicas que puedan comprometer la cura

Advertencias y precauciones

- Todas las complicaciones adicionales en potencial, se tienen que discutir con el paciente que a su vez tendrá que firmar los formularios de consentimiento.
- Siempre estará la posibilidad de fracaso de un implante debido a no haberse podido obtener una buena oseointegración con el hueso circundante. Esa situación

puede conducir a que se pierda más que la restauración sostenida por el implante y el hueso.

- El contenido estará esterilizado, siempre y cuando los embalajes se mantengan intactos.

- Certifíquese la fecha de vencimiento del producto antes de utilizarlo.

Hacer una minuciosa planificación preoperatoria

- Se tiene que practicar rigurosamente una higiene por parte del paciente y un mantenimiento profesional regular

Efectos adversos

1. No integración
2. Pérdida de integración
3. Dehiscencia que hace necesario el injerto de hueso
4. Perforación del seno maxilar, del borde interior, de la placa lingual, y del canal alveolar inferior.
5. Infección evidenciada por absceso, fístula supuración, inflamación, radiolucencia.

6. Dolor persistente, anestesia temporal, parestesia.

7. Pérdida ósea excesiva que exige intervención.

8. Rotura del implante

Almacenamiento

Los productos se tienen que almacenar a temperatura ambiente en su envase original y fuera del alcance de los niños. No usar productos cuya esterilidad haya sido comprometida.

ELABORADO POR
PARODI NOLASCO PRODUCTOS MEDICOS
de Gerardo Ariel Parodi Nolasco
calle 24 nº3335. Mercedes (6600)
Buenos Aires, Argentina.
Tel: (+54 11) 3202-1221
Bioargen@gmail.com
www.bioargen.com.ar



No Reutilizar



Usar antes de



Número de Lote

STERILE | R

Esterilizado por Rayos



Fecha Fabricación

www.bioargen.com.ar

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS.

Directora Técnica: Farmacéutica María Gabriela Oliva. MP 20.571.

AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. PM-1937-1